



## Quality Notification

1402/10/02	تاریخ اعتبار	1401/10/02	تاریخ اعلان	FR-QN-02	QN Code
تشریح محدوده تشخیصی آنتی سرم های ضد Rh (Anti-D) تولیدی					عنوان
معرفی کلون های سلولی و قابلیت و توان تشخیصی واریانت های آنتی ژن D توسط Anti-D Blend و Anti-D IgM					هدف کاربردی

## مشخصات معرف ها

نوع معرف	کلاس آنتی بادی	کلون سلولی	حداقل تیتر آنتی بادی
Anti-D IgM	IgM	P3x61	1:64
Anti-D Blend	IgG + IgM	P3x61+ P3X21223B10 + P3x290 + P3x35	1:64

## قدرت تشخیص واریانت های Rh

D Variants											نوع معرف
HMi	Ro-Har	DBT	DFR	VII	VI*	Va	IVb	IVa	IIIa IIIb IIIc	II	
+	+	+	±	+	-	+	+	+	+	+	Anti-D IgM
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Anti-D Blend

\* واریانت DVI شایع ترین واریانتی است که با تولید آنتی بادی ضد D در دریافت کنندگان خون و مادران باردار در ارتباط است، بنابراین توصیه می شود که تمامی اهداکنندگان و نوزادان تازه متولد شده از نظر DVI مورد بررسی قرار گیرند، لذا استفاده از معرف Anti-D Blend در این موارد پیشنهاد می شود.

در سایر موارد (تعیین گروه خون در بیماران و افراد عادی) استفاده از معرف Anti-D IgM بلامانع است. توصیه می شود نتایج Rh منفی با استفاده آنتی هیومن گلوبولین و معرف Anti-D IgG بررسی شوند.

Daniels G. Variant of Rh-D – Current Testing and Clinical Consequence. BGoH, 2013, 161: 461-470.

مسئول فنی

مدیر کنترل کیفی



ISO 13485

کارخانه: مهرشهر کرج، منطقه ویژه اقتصادی پیام، بلوار شهید بابایی، خیابان ششم کد پستی: ۳۱۸۷۴۱۱۲۵۱  
تلفن: ۰۲۶ - ۳۴۲۳۹۱۳۸ و ۰۲۶ - ۳۴۲۳۹۵۳۸ فکس: ۰۲۶ - ۳۴۲۳۹۱۳۹ و ۰۲۶ - ۳۴۰۰۸۷۱۴

دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، خیابان نساء، خیابان زرنگار، پلاک ۱۳ کد پستی: ۱۹۱۱۶۴۷۶۱۱  
تلفن: ۰۲۱ - ۹۶۶۲۳۰۰۰ فکس: ۰۲۱ - ۲۲۲۵۴۹۸۳